



INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

TRAUMAFIX

Nome Técnico: INSTRUMENTAL PARA IMPLANTE ORTOPÉDICO

Nome Comercial: BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

Modelo Comercial: BROCAS DIAMANTADAS

Data de Fabricação: Veja Rotulagem do Produto

Lote: Veja Rotulagem do Produto

Material: Aço Inox

Validade: 05 anos

Registro ANVISA n.º: 8245209002

Responsável Técnico: Felipe Ribeiro Mendes Gasparoto CREA-SP: 507.124.825-8

Fabricado por:

MRP – Produtos Médicos Importação e Exportação Ltda.

Rua Irineu Bianchini n.º 85- CEP- 13670-462 – Santa Rita do Passa Quatro –SP

SAC: (19) 3582-1079 – Email: comercial@traumafix.net.br

Atenção: Ler com atenção as instruções de uso antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nestas instruções. A não observação das instruções poderá levar a ocorrências de complicações.

• PRODUTO ESTÉRIL E PROIBIDO REPROCESSAMENTO

1. FORMA DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL

As Brocas Cirúrgicas Diamantadas Traumafix são comercializadas estéreis por Óxido de Etileno - ETO, e são apresentadas em uma embalagem única de blister, termo selado com papel de selamento Tyvek e contendo uma unidade. Acondicionado em caixa de papelão triples, contendo o selo de identificação de esterilização e as seguintes informações: identificação do fabricante (razão social, CNPJ e endereço), responsável técnico, dados do produto e data de validade.

2. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

0000	Descrição	Código	Descrição
0000.0001	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 50.0 ER-1	0000.0199	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 140.0 ER-1
0000.0002	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 60.0 ER-1	0000.0200	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 150.0 ER-1
0000.0003	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 70.0 ER-1	0000.0201	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 50.0 ER-1
0000.0004	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 80.0 ER-1	0000.0202	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 60.0 ER-1
0000.0005	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 90.0 ER-1	0000.0203	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 70.0 ER-1
0000.0006	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 100.0 ER-1	0000.0204	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 80.0 ER-1
0000.0007	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 110.0 ER-1	0000.0205	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 90.0 ER-1
0000.0008	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 120.0 ER-1	0000.0206	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 100.0 ER-1
0000.0009	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 130.0 ER-1	0000.0207	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 110.0 ER-1



INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

TRAUMAFIX

0000.0010	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 140.0 ER-1	0000.0208	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 120.0 ER-1
0000.0011	BROCA DIAMANTADA Ø 0.60 X 150.0 ER-1	0000.0209	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 130.0 ER-1
0000.0012	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 50.0 ER-1	0000.0210	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 140.0 ER-1
0000.0013	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 60.0 ER-1	0000.0211	BROCA DIAMANTADA Ø 5.50 X 150.0 ER-1
0000.0014	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 70.0 ER-1	0000.0212	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 50.0 ER-1
0000.0015	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 80.0 ER-1	0000.0213	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 60.0 ER-1
0000.0016	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 90.0 ER-1	0000.0214	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 70.0 ER-1
0000.0017	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 100.0 ER-1	0000.0215	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 80.0 ER-1
0000.0018	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 110.0 ER-1	0000.0216	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 90.0 ER-1
0000.0019	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 120.0 ER-1	0000.0217	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 100.0 ER-1
0000.0020	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 130.0 ER-1	0000.0218	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 110.0 ER-1
0000.0021	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 140.0 ER-1	0000.0219	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 120.0 ER-1
0000.0022	BROCA DIAMANTADA Ø 0.70 X 150.0 ER-1	0000.0220	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 130.0 ER-1
0000.0023	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 50.0 ER-1	0000.0221	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 140.0 ER-1
0000.0024	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 60.0 ER-1	0000.0222	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 150.0 ER-1
0000.0025	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 70.0 ER-1	0000.0223	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 50.0 ER-1
0000.0026	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 80.0 ER-1	0000.0224	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 60.0 ER-1
0000.0027	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 90.0 ER-1	0000.0225	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 70.0 ER-1
0000.0028	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 100.0 ER-1	0000.0226	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 80.0 ER-1
0000.0029	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 110.0 ER-1	0000.0227	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 90.0 ER-1
0000.0030	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 120.0 ER-1	0000.0228	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 100.0 ER-1
0000.0031	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 130.0 ER-1	0000.0229	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 110.0 ER-1
0000.0032	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 140.0 ER-1	0000.0230	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 120.0 ER-1
0000.0033	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 150.0 ER-1	0000.0231	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 130.0 ER-1
0000.0034	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 50.0 ER-1	0000.0232	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 140.0 ER-1
0000.0035	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 60.0 ER-1	0000.0233	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 150.0 ER-1
0000.0036	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 70.0 ER-1	0000.0234	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 70.0 ER-2
0000.0037	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 80.0 ER-1	0000.0235	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 80.0 ER-2
0000.0038	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 90.0 ER-1	0000.0236	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 100.0 ER-2
0000.0039	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 100.0 ER-1	0000.0237	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 70.0 ER-2
0000.0040	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 110.0 ER-1	0000.0238	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 80.0 ER-2
0000.0041	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 120.0 ER-1	0000.0239	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 100.0 ER-2
0000.0042	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 130.0 ER-1	0000.0240	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 70.0 ER-2
0000.0043	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 140.0 ER-1	0000.0241	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 80.0 ER-2
0000.0044	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 150.0 ER-1	0000.0242	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 90.0 ER-2
0000.0045	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 50.0 ER-1	0000.0243	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 100.0 ER-2
0000.0046	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 60.0 ER-1	0000.0244	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 70.0 ER-2
0000.0047	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 70.0 ER-1	0000.0245	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 80.0 ER-2
0000.0048	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 80.0 ER-1	0000.0246	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 90.0 ER-2
0000.0049	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 90.0 ER-1	0000.0247	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 100.0 ER-2
0000.0050	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 100.0 ER-1	0000.0248	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 70.0 ER-2
0000.0051	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 110.0 ER-1	0000.0249	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 50.0 ER-2



INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

TRAUMAFIX

0000.0052	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 120.0 ER-1	0000.0250	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 70.0 ER-2
0000.0053	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 130.0 ER-1	0000.0251	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 80.0 ER-2
0000.0054	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 140.0 ER-1	0000.0252	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 90.0 ER-2
0000.0055	BROCA DIAMANTADA Ø 1.20 X 150.0 ER-1	0000.0253	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 80.0 ER-2
0000.0056	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 50.0 ER-1	0000.0254	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 70.0 ER-3
0000.0057	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 60.0 ER-1	0000.0255	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 80.0 ER-3
0000.0058	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 70.0 ER-1	0000.0256	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 90.0 ER-3
0000.0059	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 80.0 ER-1	0000.0257	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 100.0 ER-3
0000.0060	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 90.0 ER-1	0000.0258	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 150.0 ER-3
0000.0061	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 100.0 ER-1	0000.0259	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 150.0 ER-3
0000.0062	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 110.0 ER-1	0000.0260	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 70.0 ER-3
0000.0063	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 120.0 ER-1	0000.0261	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 80.0 ER-3
0000.0064	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 130.0 ER-1	0000.0262	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 90.0 ER-3
0000.0065	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 140.0 ER-1	0000.0263	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 100.0 ER-3
0000.0066	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 150.0 ER-1	0000.0264	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 150.0 ER-3
0000.0067	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 50.0 ER-1	0000.0265	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 50.0 ER-3
0000.0068	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 60.0 ER-1	0000.0266	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 80.0 ER-3
0000.0069	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 70.0 ER-1	0000.0267	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 90.0 ER-3
0000.0070	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 80.0 ER-1	0000.0268	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 100.0 ER-3
0000.0071	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 90.0 ER-1	0000.0269	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 150.0 ER-3
0000.0072	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 100.0 ER-1	0000.0270	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 70.0 ER-3
0000.0073	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 110.0 ER-1	0000.0271	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 80.0 ER-3
0000.0074	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 120.0 ER-1	0000.0272	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 90.0 ER-3
0000.0075	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 130.0 ER-1	0000.0273	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 100.0 ER-3
0000.0076	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 140.0 ER-1	0000.0274	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 150.0 ER-3
0000.0077	BROCA DIAMANTADA Ø 1.60 X 150.0 ER-1	0000.0275	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 50.0 ER-3
0000.0078	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 50.0 ER-1	0000.0276	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 70.0 ER-3
0000.0079	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 60.0 ER-1	0000.0277	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 80.0 ER-3
0000.0080	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 70.0 ER-1	0000.0278	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 90.0 ER-3
0000.0081	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 80.0 ER-1	0000.0279	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 100.0 ER-3
0000.0082	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 90.0 ER-1	0000.0280	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 120.0 ER-3
0000.0083	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 100.0 ER-1	0000.0281	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 150.0 ER-3
0000.0084	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 110.0 ER-1	0000.0282	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 70.0 ER-3
0000.0085	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 120.0 ER-1	0000.0283	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 90.0 ER-3
0000.0086	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 130.0 ER-1	0000.0284	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 100.0 ER-3
0000.0087	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 140.0 ER-1	0000.0285	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 150.0 ER-3
0000.0088	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 150.0 ER-1	0000.0286	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 150.0 ER-3
0000.0089	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 50.0 ER-1	0000.0287	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 110.0 ER-4
0000.0090	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 60.0 ER-1	0000.0288	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 150.0 ER-4
0000.0091	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 70.0 ER-1	0000.0289	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 130.0 ER-4
0000.0092	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 80.0 ER-1	0000.0290	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 150.0 ER4
0000.0093	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 90.0 ER-1	0000.0291	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 110.0 ER-4



INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

TRAUMAFIX

0000.0094	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 100.0 ER-1	0000.0292	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 150.0 ER-4
0000.0095	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 110.0 ER-1	0000.0293	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 90.0 ER-4
0000.0096	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 120.0 ER-1	0000.0294	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 110.0 ER-4
0000.0097	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 130.0 ER-1	0000.0295	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 130.0 ER-4
0000.0098	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 140.0 ER-1	0000.0296	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 150.0 ER-4
0000.0099	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 150.0 ER-1	0000.0297	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 80.0 ER-4
0000.0100	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 50.0 ER-1	0000.0298	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 110.0 ER-4
0000.0101	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 60.0 ER-1	0000.0299	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 130.0 ER-4
0000.0102	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 70.0 ER-1	0000.0300	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 150.0 ER-4
0000.0103	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 80.0 ER-1	0000.0301	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 110.0 ER-4
0000.0104	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 90.0 ER-1	0000.0302	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 150.0 ER-4
0000.0105	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 100.0 ER-1	0000.0303	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 80.0 ER-4
0000.0106	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 110.0 ER-1	0000.0304	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 110.0 ER-4
0000.0107	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 120.0 ER-1	0000.0305	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 130.0 ER-4
0000.0108	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 130.0 ER-1	0000.0306	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 150.0 ER-4
0000.0109	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 140.0 ER-1	0000.0307	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 110.0 ER-4
0000.0110	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 150.0 ER-1	0000.0308	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 130.0 ER-4
0000.0111	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 50.0 ER-1	0000.0309	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 150.0 ER-4
0000.0112	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 60.0 ER-1	0000.0310	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 70.0 ER-5
0000.0113	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 70.0 ER-1	0000.0311	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 90.0 ER-5
0000.0114	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 80.0 ER-1	0000.0312	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 100.0 ER-5
0000.0115	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 90.0 ER-1	0000.0314	BROCA DIAMANTADA Ø 1.80 X 70.0 ER-5
0000.0116	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 100.0 ER-1	0000.0315	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 70.0 ER-5
0000.0117	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 110.0 ER-1	0000.0316	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 70.0 ER-5
0000.0118	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 120.0 ER-1	0000.0317	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 90.0 ER-5
0000.0119	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 130.0 ER-1	0000.0318	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 100.0 ER-5
0000.0120	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 140.0 ER-1	0000.0319	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 120.0 ER-5
0000.0121	BROCA DIAMANTADA Ø 2.50 X 150.0 ER-1	0000.0320	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 150.0 ER-5
0000.0122	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 50.0 ER-1	0000.0321	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 90.0 ER-5
0000.0123	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 60.0 ER-1	0000.0322	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 70.0 ER-5
0000.0124	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 70.0 ER-1	0000.0323	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 90.0 ER-5
0000.0126	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 80.0 ER-1	0000.0324	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 100.0 ER-5
0000.0127	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 90.0 ER-1	0000.0325	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 120.0 ER-5
0000.0128	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 100.0 ER-1	0000.0326	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 150.0 ER-5
0000.0129	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 110.0 ER-1	0000.0327	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 70.0 ER-5
0000.0130	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 120.0 ER-1	0000.0328	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 90.0 ER-5
0000.0131	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 130.0 ER-1	0000.0329	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 100.0 ER-5
0000.0132	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 140.0 ER-1	0000.0330	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 120.0 ER-5
0000.0133	BROCA DIAMANTADA Ø 2.70 X 150.0 ER-1	0000.0331	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 150.0 ER-5
0000.0134	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 50.0 ER-1	0000.0332	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 70.0 ER-5
0000.0135	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 60.0 ER-1	0000.0333	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 90.0 ER-5
0000.0136	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 70.0 ER-1	0000.0334	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 100.0 ER-5



INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

TRAUMAFIX

0000.0137	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 80.0 ER-1	0000.0335	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 120.0 ER-5
0000.0138	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 90.0 ER-1	0000.0336	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 150.0 ER-5
0000.0139	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 100.0 ER-1	0000.0337	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 70.0 ER-5
0000.0140	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 110.0 ER-1	0000.0338	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 90.0 ER-5
0000.0141	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 120.0 ER-1	0000.0339	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 100.0 ER-5
0000.0142	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 130.0 ER-1	0000.0340	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 120.0 ER-5
0000.0143	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 140.0 ER-1	0000.0341	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 150.0 ER-5
0000.0144	BROCA DIAMANTADA Ø 2.90 X 150.0 ER-1	0000.0342	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 60.0 ER-6
0000.0145	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 50.0 ER-1	0000.0343	BROCA DIAMANTADA Ø 0.80 X 100.0 ER-6
0000.0146	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 60.0 ER-1	0000.0344	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 100.0 ER-6
0000.0147	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 70.0 ER-1	0000.0345	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 120.0 ER-6
0000.0148	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 80.0 ER-1	0000.0346	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 90.0 ER-6
0000.0149	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 90.0 ER-1	0000.0347	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 100.0 ER-6
0000.0150	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 100.0 ER-1	0000.0348	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 140.0 ER-6
0000.0151	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 110.0 ER-1	0000.0349	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 120.0 ER-6
0000.0152	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 120.0 ER-1	0000.0350	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 80.0 ER-6
0000.0153	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 130.0 ER-1	0000.0351	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 90.0 ER-6
0000.0154	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 140.0 ER-1	0000.0352	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 100.0 ER-6
0000.0155	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 150.0 ER-1	0000.0353	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 120.0 ER-6
0000.0156	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 50.0 ER-1	0000.0354	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 140.0 ER-6
0000.0157	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 60.0 ER-1	0000.0355	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 80.0 ER-6
0000.0158	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 70.0 ER-1	0000.0356	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 90.0 ER-6
0000.0159	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 80.0 ER-1	0000.0357	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 100.0 ER-6
0000.0160	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 90.0 ER-1	0000.0358	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 110.0 ER-6
0000.0161	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 100.0 ER-1	0000.0359	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 120.0 ER-6
0000.0162	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 110.0 ER-1	0000.0360	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 140.0 ER-6
0000.0163	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 120.0 ER-1	0000.0361	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 120.0 ER-6
0000.0164	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 130.0 ER-1	0000.0362	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 80.0 ER-6
0000.0166	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 140.0 ER-1	0000.0363	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 100.0 ER-6
0000.0167	BROCA DIAMANTADA Ø 3.50 X 150.0 ER-1	0000.0364	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 140.0 ER-6
0000.0168	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 50.0 ER-1	0000.0365	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 100.0 ER-6
0000.0169	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 60.0 ER-1	0000.0366	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 120.0 ER-6
0000.0170	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 70.0 ER-1	0000.0367	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 140.0 ER-6
0000.0171	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 80.0 ER-1	0000.0368	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 100.0 ER-6
0000.0172	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 90.0 ER-1	0000.0369	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 110.0 ER-8
0000.0173	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 100.0 ER-1	0000.0370	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 110.0 ER-8
0000.0174	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 110.0 ER-1	0000.0371	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 110.0 ER-8
0000.0175	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 120.0 ER-1	0000.0372	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 110.0 ER-8
0000.0176	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 130.0 ER-1	0000.0373	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 110.0 ER-8
0000.0177	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 140.0 ER-1	0000.0374	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 110.0 ER-8
0000.0178	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 150.0 ER-1	0000.0375	BROCA DIAMANTADA Ø 1.40 X 110.0 ER-9
0000.0179	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 50.0 ER-1	0000.0376	BROCA DIAMANTADA Ø 2.30 X 110.0 ER-9



INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

TRAUMAFIX

0000.0180	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 60.0 ER-1	0000.0377	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 110.0 ER-9
0000.0181	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 70.0 ER-1	0000.0378	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 150.0 ER-9
0000.0182	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 80.0 ER-1	0000.0379	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 110.0 ER-9
0000.0183	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 90.0 ER-1	0000.0380	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 150.0 ER-9
0000.0184	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 100.0 ER-1	0000.0381	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 110.0 ER-9
0000.0185	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 110.0 ER-1	0000.0382	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 150.0 ER-9
0000.0186	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 120.0 ER-1	0000.0383	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 110.0 ER-9
0000.0187	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 130.0 ER-1	0000.0384	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 150.0 ER-9
0000.0188	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 140.0 ER-1	0000.0385	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 80.0 ER-10
0000.0189	BROCA DIAMANTADA Ø 4.50 X 150.0 ER-1	0000.0386	BROCA DIAMANTADA Ø 1.00 X 90.0 ER-10
0000.0190	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 50.0 ER-1	0000.0387	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 80.0 ER-10
0000.0191	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 60.0 ER-1	0000.0388	BROCA DIAMANTADA Ø 2.10 X 90.0 ER-10
0000.0192	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 70.0 ER-1	0000.0389	BROCA DIAMANTADA Ø 3.10 X 90.0 ER-10
0000.0193	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 80.0 ER-1	0000.0390	BROCA DIAMANTADA Ø 4.00 X 90.0 ER-10
0000.0194	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 90.0 ER-1	0000.0391	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 90.0 ER-10
0000.0195	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 100.0 ER-1	0000.0392	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 80.0 ER-10
0000.0196	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 110.0 ER-1	0000.0393	BROCA DIAMANTADA Ø 6.00 X 90.0 ER-10
0000.0197	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 120.0 ER-1	0000.0394	BROCA DIAMANTADA Ø 7.00 X 90.0 ER-10
0000.0198	BROCA DIAMANTADA Ø 5.00 X 130.0 ER-1		

3. MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO

Na fabricação das brocas diamantadas é utilizado o aço inoxidável M340, conforme ASTM F138.

4. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

As Brocas Diamantadas devem ser acopladas a uma peça de mão específica, a fim de está se conectar em um motor cirúrgico, de modo que, auxilia na preparação do tecido ósseo.

5. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

5.1 Armazenamento

Os dispositivos deverão ser armazenados em local limpo, seco, arejado, ao abrigo da luz solar direta e em sua embalagem original, sob uma temperatura máxima de 40°C e com umidade relativa máxima de 55%.

5.2 Conservação

As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam íntegros para o procedimento cirúrgico. Portanto, os cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos.



TRAUMAFIX

INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

5.3 Manuseio e Inspeção da Broca Diamantada

O produto fornecido embalado na forma estéril e os seguintes aspectos devem ser verificados:

Antes da abertura da embalagem:

- Integridade da embalagem: caso a embalagem esteja violada ou danificada o produto não pode ser utilizado.
- Não utilizar instrumentos com prazo de validade vencido.
- Verificar por meio de inspeção técnica se há danos físicos, tais como: envergaduras, amassados ou qualquer outra característica associada à conservação e sua funcionalidade. Caso haja alguma peça reprovada, a mesma deve ser separada e destinada para descarte.

Após a abertura da embalagem:

- Integridade do produto: o produto deve estar íntegro, com superfície uniforme, livre de riscos, manchas ou qualquer sinal de dano.
- Nunca utilizar produto danificado.

Manipular os dispositivos esterilizados de acordo com os procedimentos assépticos adequados, proteger as brocas de todo e qualquer contato acidental com outros materiais, o que poderia provocar danos no acabamento da superfície. Inspeccionar todo e qualquer dispositivo antes de utilizá-lo, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado.

Informações adicionais sobre os dispositivos poderão ser obtidas junto a TRAUMAFIX ou distribuidores e/ou revendedor.

5.4 Transporte

As Brocas Diamantadas Traumafix devem ser transportados em local limpo, longe de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob temperatura inferior a 40°C e umidade máxima de 55%, de forma a impedir qualquer dano ou alteração em suas características.

6. INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES PARA USO DO PRODUTO MÉDICO

6.1 Pré-operatório:

A escolha dos instrumentos faz parte do planejamento da cirurgia e deve ser feita através de uma solicitação formal do profissional de saúde, que deverá especificar a técnica a ser utilizada, as características do implante a ser empregado e os detalhes dos instrumentos a serem utilizados. É fundamental inspecionar cuidadosamente cada peça para garantir que esteja em condições adequadas de uso e limpeza. Rever a técnica de instrumentação cirúrgica antes da realização do procedimento contribui para a eficácia da cirurgia.

6.2 Intra- operatório:

Os instrumentos são designados exclusivamente para auxílio médico e nunca devem ser considerados parte permanente dos implantes após a cirurgia. Devem ser cuidadosamente escolhidos e ajustados especificamente para o dispositivo a ser implantado, garantindo a correta adaptação do implante ao local da cirurgia.

7. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada;
- O correto manuseio do instrumental durante o procedimento é decisiva para o perfeito andamento da cirurgia;
- Produto não reprocessado, logo não deve ser reutilizado e nem reesterilizado, portanto depois de utilizado deve ser descartado;
- Não utilizar a broca se houver sinais de danos a mesma;
- Remover o produto de sua embalagem somente no momento de sua utilização e manusear em campos estéreis para assegurar a esterilidade.

7.1 Indicação e Finalidade de Uso

As Brocas Diamantadas Traumafix são indicadas para utilização na perfuração, corte ou fresagem dos tecidos ósseos. Logo, os instrumentais Traumafix foram projetados e desenvolvidos para fornecer ao profissional médico plenas condições de realizar procedimentos cirúrgicos invasivos, devendo ser esse profissional, habilitado, com conhecimento da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

7.2 Contra Indicações e Efeitos Colaterais

Não há contra indicações e efeitos colaterais.

8. PRECAUÇÕES

- Não retrabalhar uma broca, pois, isso afetará a função específica de seu uso alterando suas dimensões gerais. Logo, qualquer retrabalho poderá causar desgaste excessivo, descaracterizando sua função, tendo como consequências grandes prejuízos ao uso pretendido e ao paciente.
- O uso contínuo ou prolongado de uma broca poderá causar desgaste na mesma e acarretar possíveis rupturas. De modo que, uma broca desgastada fatalmente deixará o procedimento cirúrgico mais prolongado, podendo ainda causar necrose térmica devido ao aquecimento por fricção.
- Para bons resultados cirúrgicos e para evitar todo e qualquer perda do fio de corte, necrose térmica devido o aquecimento por fricção, arqueamento e risco de ruptura, utilizar sempre brocas novas a cada procedimento cirúrgico.
- O uso de irrigação durante a operação com brocas reduzirá a possibilidade à necrose térmica.
- Assegurar-se de que a broca esteja devidamente encaixada e travada na peça de mão antes de acionar o motor cirúrgico.
- Não tentar inserir ou remover a broca enquanto a peça de mão estiver em funcionamento.
- Pressão excessiva pode dobrar ou fraturar o instrumental, causando consequentemente danos ao tecido e/ou até perda do controle tátil, logo, recomenda-se não aplicar uma força pressão excessiva.

9. ESTERILIZAÇÃO










As Brocas Diamantadas Traumafix são esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO).

Produto de Uso Único. A embalagem estéril deve ser inspecionada antes de ser aberta e se estiver violada o produto não deve ser usado.

10. DESCARTE

Com a finalidade de prevenir a reutilização das brocas diamantadas, as mesmas devem ser inutilizadas imediatamente. De modo que o descarte deve obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante. Recomendamos que as brocas sejam deformadas para o descarte seguir os procedimentos legais, seguindo a norma RDC 222/2018 que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.

11. SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS CONTIDOS NO RÓTULO

	Código do Produto		Data de Fabricação		Validade
	Número do Lote		Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Manter afastado de luz solar ou calor
	Manter seco		Consultar as Instruções para utilização		Estéril por Óxido de Etileno

Os símbolos utilizados no rótulo seguem os requisitos da norma ABNT NBR ISO 15223-1 - Produtos para saúde - Símbolos a serem utilizados em rótulos, rotulagem e informações a serem fornecidas de produtos para saúde Parte 1: Requisitos gerais.

12. INSTRUÇÃO DE USO

Estas INSTRUÇÕES DE USO são disponibilizadas em formato não impresso, através do endereço eletrônico do fabricante www.traumafix.net.br

As INSTRUÇÕES DE USO estão anexadas no site através do NÚMERO REGISTRO/ CADASTRO ANVISA e respectivo NOME COMERCIAL do produto, informados no rótulo do produto adquirido.

Todas AS INSTRUÇÕES DE USO disponibilizadas no website possuem a identificação da revisão e data de emissão do documento. Sendo que o usuário deve atentar-se para a correta versão (revisão e data de emissão) do documento em relação à DATA DE FABRICAÇÃO informada no rótulo do produto adquirido.

Caso seja de interesse do usuário, as INSTRUÇÕES DE USO poderão ser fornecidas em formato impresso, sem custo adicional. Sendo que a solicitação das mesmas deverá ser realizada junto ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do fabricante, informado a seguir:



INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX

TRAUMAFIX

Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: +55 19 5382-1079

<http://www.traumafix.net.br>

Rua: Iriniu Bianchini, nº 85 – Bairro Distrito Industrial

Nilton Naitzel Jr. CEP: 13670-462

Santa Rita do Passa Quatro – São Paulo – Brasil

MRP- Produtos Médicos Importação e Exportação Ltda.

Rua Irineu Bianchini n.º 85- CEP-13670-462 - SRPQ – SP

SAC: (19) 3582-1079

Email: comercial@traumafix.net.br

Registro ANVISA n.º: 8245209002

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Ribiero Mendes Gasparoto –

CREA/SP: 507.124.825-8

Mário Roberto Perussi
Responsável Legal

Felipe Ribeiro Mendes
Gasparoto
Responsável Técnico
CREA-SP: 507.124.825-8



TRAUMAFIX

INSTRUÇÕES DE USO BROCAS DIAMANTADAS TRAUMAFIX
